

Les formes du coussin Ultra permettent un meilleur contrôle de la répartition de la pression sur

les protubérances osseuses (ischions et coccyx) et assurent une distribution contrôlée de la charge sur l'étendue de la surface du coussin. Il aide à optimiser la posture de l'utilisateur en prévenant le glissement du bassin vers l'avant (bascule postérieure) ainsi qu'en latéral. La mousse employée

à la base du coussin est un uréthane injecté de densité moyenne offrant la fermeté et la souplesse requises au confort et à la stabilité ciblés alors que l'espace alloué à la cuvette est rempli d'une mousse à mémoire ("Temper Foam" T36) qui permet d'absorber et respecter le relief ischiatique. Pour en augmenter le confort, une mousse de dispersion (Visco élastique) en recouvre la surface.

Ce coussin vous est proposé en version standard et personnalisé.



COUSSIN ULTRA STANDARD


Dans cette page et les suivantes, le coussin *Ultra* vous est proposé en version **standard** et **personnalisé**.

(voir tableaux des formats et formes.)


Dans les deux cas, une housse composée de nylon et de lycra imperméable et une enveloppe d'incontinence en polyuréthane sans composantes de latex vous sont offertes.

Les possibilités d'installation vous sont démontrées à la section 1.10.

Coussin Ultra

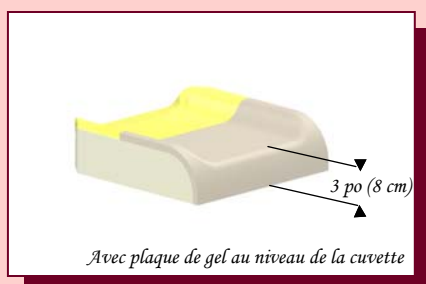


Avec plaque de gel au niveau de la cuvette

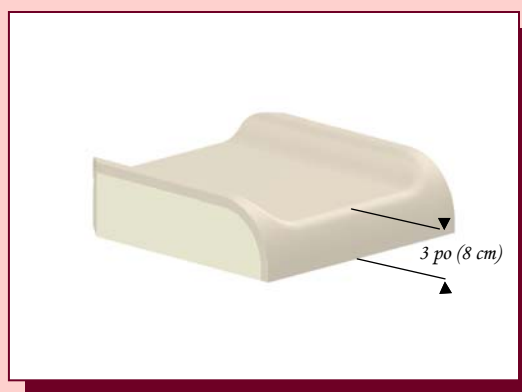

N° de produit	Description
S1266	Coussin Ultra
S1321	Coussin Ultra—Personnalisé
Housse	
S1273	Housse supplémentaire à l'achat initial
S1271	Housse de rechange coussin Ultra
Avec plaque de gel	
S1278	Plaque de gel au niveau de la cuvette
S1333	Plaque de gel au niveau de la cuvette—Personnalisé

Formats suggérés

Largeur		Profondeur	
po	cm	po	cm
15	38	15	38
16	40,5	16	40,5
17	43	17	43
18	45	18	45
19	48	19	48
20	50,8	20	50,8

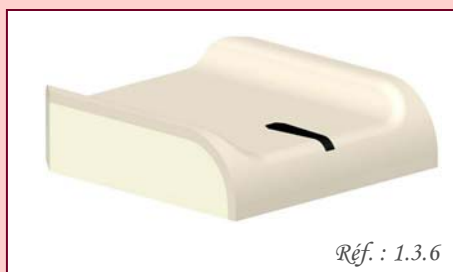


Réf. : 1.3.6



Réf. : 1.14.1



Réf. : 1.11.4

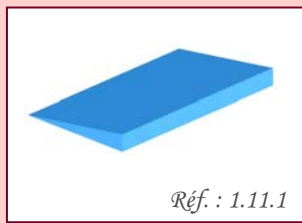

Réf. : 1.11.1




Réf. : 1.11.2

Dans cette page ainsi que les suivantes, le *coussin Ultra personnalisé* vous est proposé au format de votre choix avec différentes options de formes et d'éléments de forme.

Une housse composée de nylon et de lycra imperméables et une enveloppe d'incontinence en polyuréthane sans composantes de latex vous sont offertes.

Les possibilités d'installation vous sont démontrées à la section 1.10.

Utilisez le bon de commande .

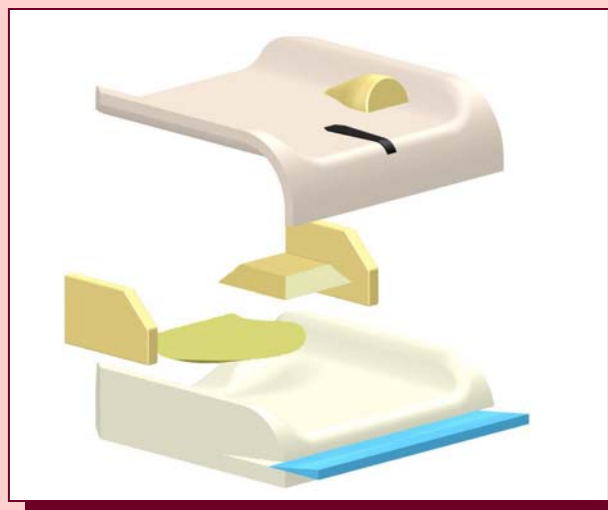

COUSSIN ULTRA PERSONNALISÉ

Le **coussin Ultra** vous est proposé de formes et de formats selon votre choix.

L'ensemble d'éléments de forme proposé comprend :

- biseau crural;
- biseau fessier;
- butée d'abduction;
- coussins pelviens.



Ces possibilités vous permettent d'optimiser la correction et le confort du bassin.

De plus, ces éléments de forme pourront, à votre demande, être stratifiés au coussin ou fixés par velcro. Par contre, les coussins pelviens sont fixés aux appuis-bras à l'aide d'attaches plastique.


Il vous est possible d'ajouter au **coussin Ultra** des éléments de forme autre que ce que vous retrouvez dans l'ensemble de base. Ils vous sont tous démontrés à la section 1.11.

Si ce cas se présente, veuillez nous indiquer sur le bon de commande les éléments de forme désirés.

Coussin Ultra

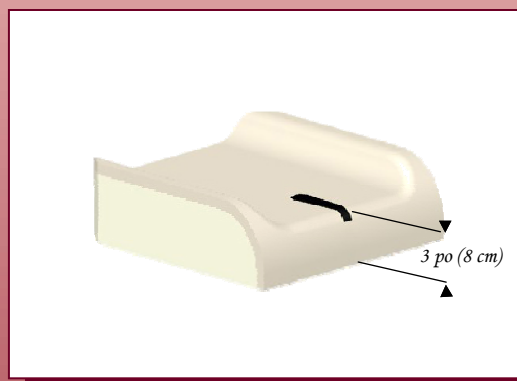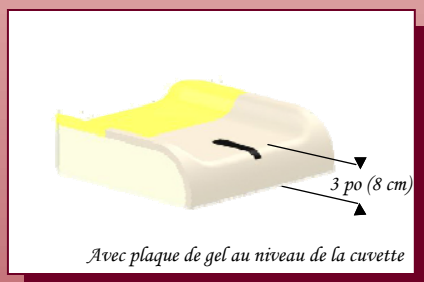

N° de produit	Description
S1321	Coussin Ultra—avec choix d'éléments de forme
Housse	
S1273	Housse supplémentaire à l'achat initial
S1326	Housse de rechange coussin Ultra—avec choix d'éléments de forme.
Avec plaque de gel	
S1333	Plaque de gel au niveau de la cuvette

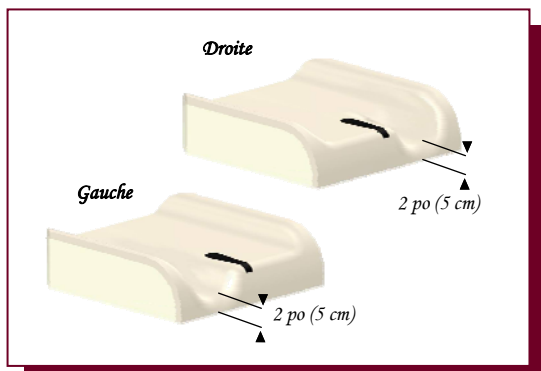


Coussin Ultra—Hémi

N° de produit	Description
S1336	Hémi à droite—Personnalisé avec choix d'éléments de forme
S1341	Hémi à gauche—Personnalisé avec choix d'éléments de forme
Housse	
S1273	Housse supplémentaire à l'achat initial
Housse de rechange	
S1351	Housse de coussin Ultra Hémi à gauche—Personnalisé
S1346	Housse de coussin Ultra Hémi à droite—Personnalisé
Avec plaque de gel	
S1358	Plaque de gel au niveau de la cuvette

Dans les cas d'hémiplégie, le coussin surbaissé unilatéralement permet au membre atteint d'être surélevé, donnant un effet de biseau crural, et au membre fonctionnel de déposer le pied sur le sol dans le but de faciliter la propulsion main – pied.

Exemple : Le coussin **Ultra—Hémi** à droite est surbaissé à gauche.

Le coussin **Ultra—Hémi—Personnalisé** vous est offert selon vos spécifications avec ses possibilités d'ajout d'éléments de forme .

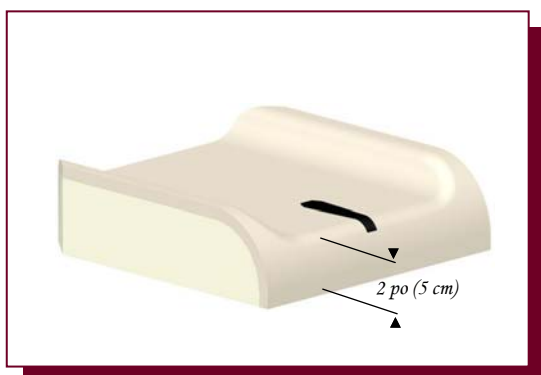


Coussin Ultra—Profilé bas

N° de produit	Description
S1361	Personnalisé avec choix d'éléments de forme
Housse	
S1273	Housse supplémentaire à l'achat initial
Housse de rechange	
S1366	Housse —Profilé bas—Personnalisé
Avec plaque de gel	
S1373	Plaque de gel au niveau de la cuvette

Le coussin **Ultra—Profilé bas—Personnalisé** est surbaissé au devant pour obtenir la hauteur siège/sol désirée, lorsqu'il y a propulsion par les membres inférieurs ou pour faciliter les transferts en position debout.


Le coussin **Ultra—Profilé bas—Personnalisé** vous est offert selon vos spécifications avec ses possibilités d'ajout d'éléments de forme .

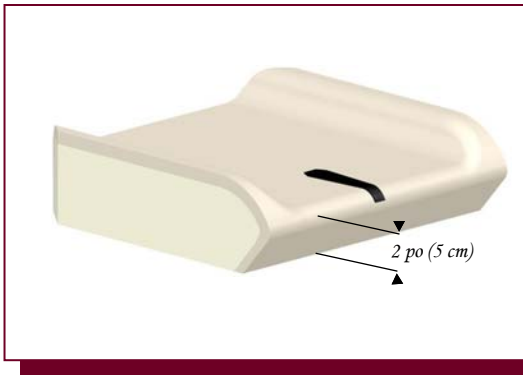

Coussin Ultra—Devant oblique

N° de produit	Description	
	po	cm
S1376	Coussin Ultra avec choix d'éléments de forme	
Housse		
S1273	Housse supplémentaire à l'achat initial	
Housse de rechange		
S1381	Housse pour coussin Ultra—Devant oblique —avec choix d'éléments de forme	
Avec plaque de gel		
S1388	Plaque de gel au niveau de la cuvette	

Le coussin peut être biseauté au devant pour bien dégager le creux poplité et les ischiens jambiers lorsque les membres inférieurs sont en rétraction. Il vous est proposé avec différents éléments de forme de la section 1.11 et les possibilités d'installation vous sont démontrées à la section 1.10.

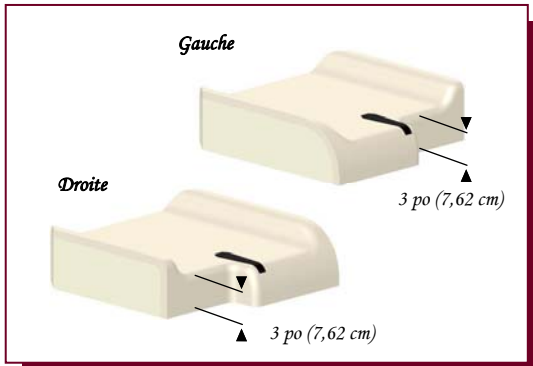

Coussin Ultra—Profondeur inégale

N° de produit	Description	
	po	cm
Retrait à droite avec choix d'éléments de forme		
S1391	-1	-2,5
S1396	-2	-5
Retrait à gauche avec choix d'éléments de forme		
S1401	-1	-2,5
S1406	-2	-5
Housse		
S1273	Housse supplémentaire à l'achat initial	
Housse de rechange		
S1411	Retrait à droite - 1 po (-2,5 cm)	
S1416	Retrait à droite - 2 po (-5 cm)	
S1421	Retrait à gauche - 1 po (-2,5 cm)	
S1426	Retrait à gauche - 2 po (-5 cm)	
Avec plaque de gel		
S1433	Plaque de gel au niveau de la cuvette	

Une rotation de bassin ou une luxation de la hanche peut occasionner une inégalité des membres inférieurs. Ce choix de profondeurs inégales peut accommoder dans ces cas et aussi lors de propulsion avec un des deux membres inférieurs. Le **Ultra—Personnalisé—Profondeur inégale** vous est proposé avec différents éléments de forme de la section 1.11 et les possibilités d'installation vous sont démontrées à la section 1.10.