


Éléments de forme pour dossier

Manuel d'utilisation

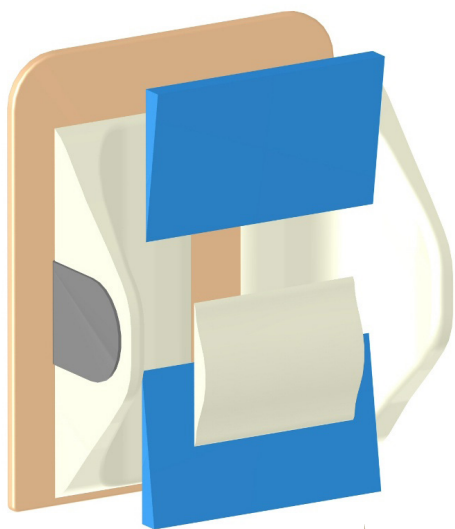

PHYSIPRO

Aides techniques à la posture et à la mobilité

Ce livret contient d'importantes informations relatives à ce produit.
Merci de le remettre à l'utilisateur final lors de la livraison.

FRANÇAIS**Les Équipements adaptés Physipro inc.**


L'entreprise Physipro inc. est fière de vous compter parmi ses clients et tient à vous remercier particulièrement pour la confiance que vous lui démontrez en vous procurant l'un de ses produits.

Le présent manuel d'utilisation a été conçu pour vous permettre d'utiliser les éléments de forme pour dossier, un produit Physipro inc., en toute sécurité et de façon optimale. Pour tous les ajustements et réglages nécessaires, Physipro inc. vous demande de vous adresser systématiquement à un professionnel reconnu.

Physipro inc. se dégage de toute responsabilité relative aux dommages corporels ou matériels résultant d'un mauvais usage, d'un manque de précaution dans l'utilisation de ses produits ou d'une modification apportée sans son consentement écrit.


Pour Physipro inc., votre satisfaction demeurera toujours une priorité.

BISEAU THORACIQUE

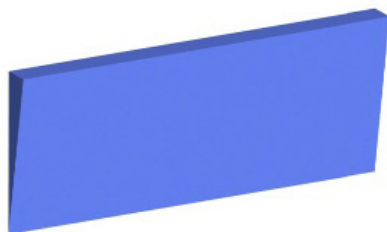

Installé au haut du dossier, il joue un rôle de compensateur, comblant un vide occasionné par une cyphose.

Cet élément s'installe en différents endroits pour corriger une mauvaise posture. Quand la mousse est en Uréthane (Néocor), il peut être fixé par velcro sur le dessus de la mousse alors qu'il est stratifié en dessous lorsqu'il est en Constructor foam.

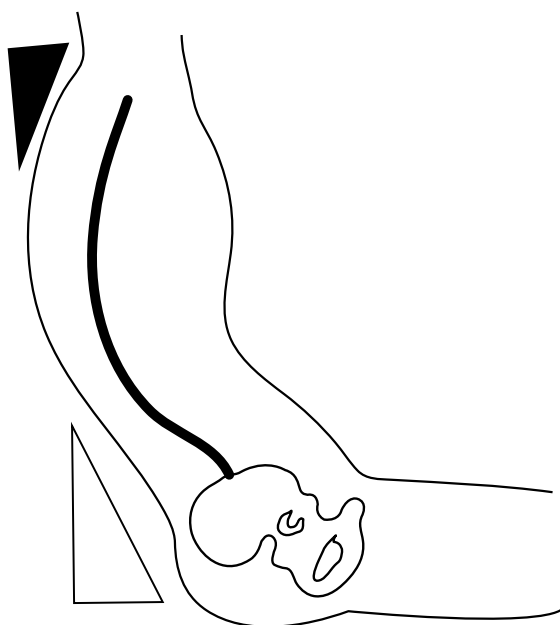


FRANÇAIS

BISEAU LOMBAIRE



Installé transversalement au bas du dossier, il augmente la surface portante du dossier et sert à compenser une rétroversion du bassin qui crée un vide au niveau lombaire.

Cet élément s'installe en différents endroits pour corriger une mauvaise posture. Quand la mousse est en Uréthane (Néocor), il peut être fixé par velcro sur le dessus de la mousse alors qu'il est stratifié en dessous lorsqu'il est en Constructor foam.



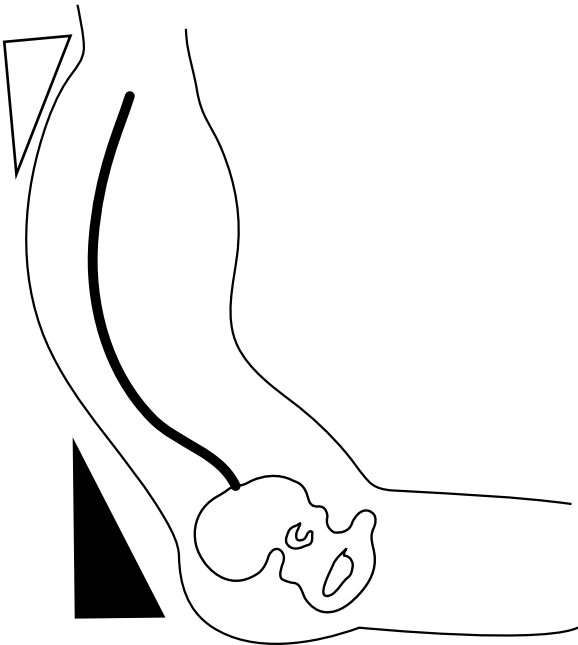


BISEAU DORSO-LOMBAIRE




Installé unilatéralement au dossier rigide ou souple, il compense ou corrige une rotation du tronc à différents degrés, tandis que bilatéralement, il augmente le confort et la surface de l'appui dorsal.

Ce biseau s'installe aussi bien sur un dossier rigide ou souple. Il peut être collé ou amovible à l'aide de Velcro. Plusieurs choix de mousses et d'épaisseurs vous sont proposés.

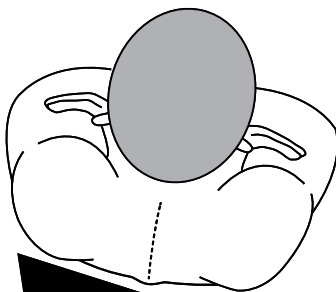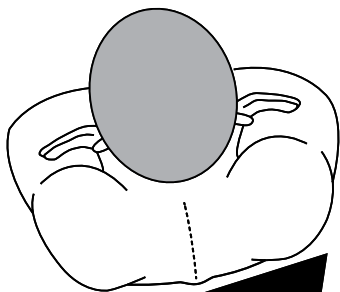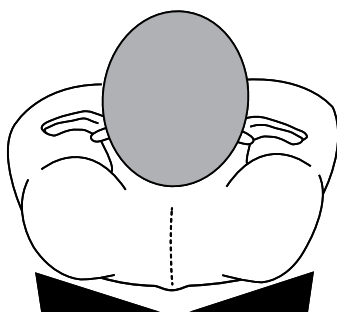


FRANÇAIS


BUTÉE SACRO-LOMBAIRE

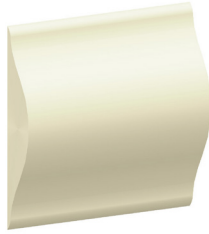

Cet élément d'aide à la posture sert à corriger une bascule du bassin. Il se place généralement dans le bas du dossier afin de donner un support dorsal accru pour combler, au besoin, un effet de lordose ou favoriser une bascule antérieure du bassin. Quand la mousse est en Uréthane (Néocor), il est fixé par velcro au dessus des mousses alors qu'il est stratifié lorsque la mousse est en Constructor foam.

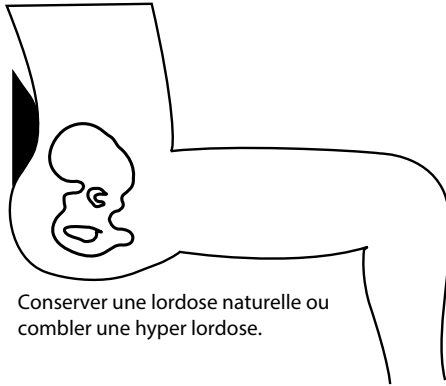

Conserver une lordose naturelle ou combler une hyper lordose.

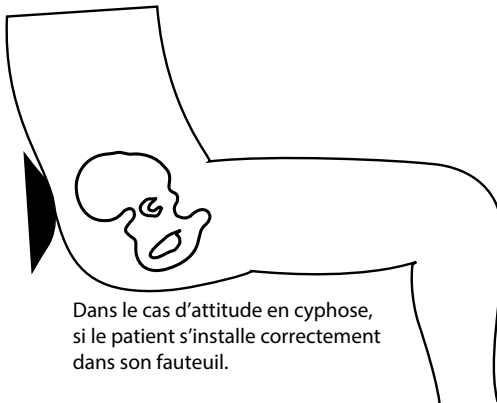

Dans le cas d'attitude en cyphose, si le patient s'installe correctement dans son fauteuil.

GARANTIE

Les éléments de forme pour dossier sont couverts par une garantie sur pièces et main d'œuvre pour une période de douze (12) mois contre tout défaut de fabrication sur les composantes optionnelles et les pièces neuves remplacées par le fournisseur ou par un établissement autorisé, et ce, à compter de la date de livraison ou, le cas échéant, de la date de remplacement. Les Équipements adaptés Physipro inc. s'engage à réparer ou remplacer les pièces défectueuses durant toute la période de garantie. Pour bénéficier du service de garantie, contactez Les Équipements adaptés Physipro inc. ou un établissement autorisé. Ne retournez pas ce produit sans consentement préalable. Dans le cas où le service serait considéré insatisfaisant, vous pouvez faire parvenir vos commentaires à l'adresse inscrite dans ce document, accompagné du nom et de l'adresse du fournisseur et de la date de livraison du produit.

Exclusions et limitations

La présente garantie ne s'applique pas aux produits altérés accidentellement ou intentionnellement, aux produits qui ont fait l'objet d'une utilisation non appropriée, de négligence, d'un mauvais entretien ou d'un mauvais entreposage. De plus, cette garantie ne s'applique pas aux produits endommagés à la suite d'une réparation ou d'une modification réalisée sans le consentement écrit de Les Équipements adaptés Physipro inc. ou d'un établissement autorisé. Les mêmes restrictions s'appliquent lors d'un endommagement découlant de toute autre circonstance indépendante de la volonté de Les Équipements adaptés Physipro inc. Enfin, cette garantie ne s'applique pas à l'usure normale des pièces ou au non-respect des indications mentionnées dans le présent document.

Les Équipements adaptés Physipro inc. se dégage de toute responsabilité liée aux dommages pouvant être subis au cours du transport.



PHYSIPRO

www.physipro.com

Canada

370, 10e Avenue Sud
Sherbrooke (Québec) J1G 2R7
Canada

T. 1 800 668-2252
F. 819 565-3337
info@physipro.com

Europe

Village des entrepreneurs
461, rue Saint-Léonard
49000 Angers
France

T. 02 41 69 38 01
F. 02.41.69.43.32
contact@physipro.fr