


Foam-In-Place Seating (**FIPS**) a été développé pour répondre aux besoins des personnes sévèrement handicapées. **FIPS technologie est utilisée par les ortho-prothésistes et les centres de réadaptation autour du monde** afin de maîtriser progressivement les déformations lentes et d'améliorer les fonctions du corps par le contrôle avancé du maintien.

La fabrication d'un ensemble FIPS est facile et prend moins d'une journée!

Mélangez tout simplement les ingrédients du **liquid SunMate®** ensemble et placez le tout dans un sac plastique sur le fauteuil de votre client. Celui ci est alors positionné sur le sac et la mousse s'expense afin de créer **un coussin personnalisé** et cela en quelques minutes.

Avec **FIPS**, vous pouvez réaliser des coussins d'assise, de dossier, des ensembles complets assise/ dossier ou simplement des petits supports.

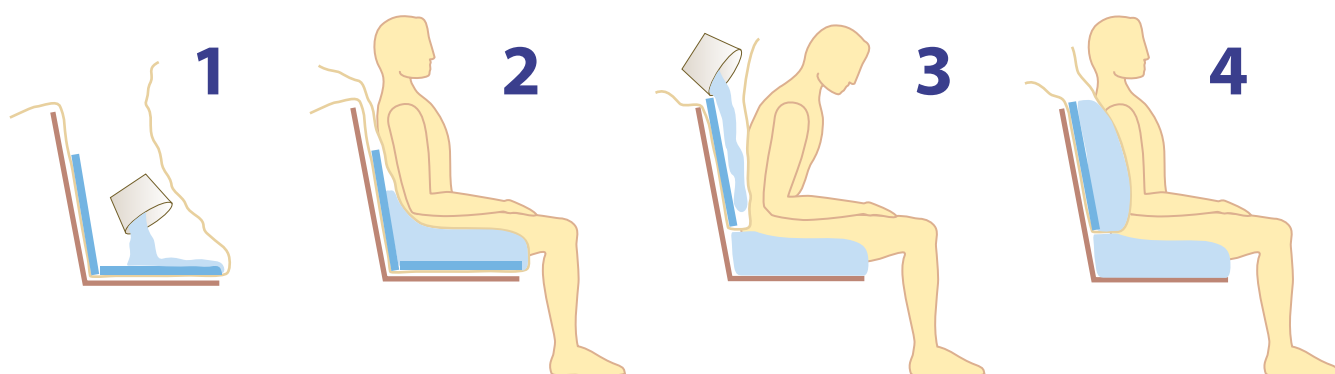


Choisir votre mousse liquide SunMate !

**Quel coussin est le mieux pour moi ?
mou, moyen, ou ferme ?**


Le graphique vous aide à choisir correctement la qualité de pression pour le sunmate et le coussin Laminar en croisant le poids de l'utilisateur et l'épaisseur du coussin.

L'exemple indiqué dans le tableau présente une personne de 80 Kg qui souhaite un coussin de 6 cm d'épaisseur, il devrait utiliser une mousse médium ferme comme support. Les zones ombrées dans le graphique indiquent les spécifications généralement non recommandées.

Le coussin en sunmate peut être conçu pour fournir le confort et le maintien à n'importe quel utilisateur.

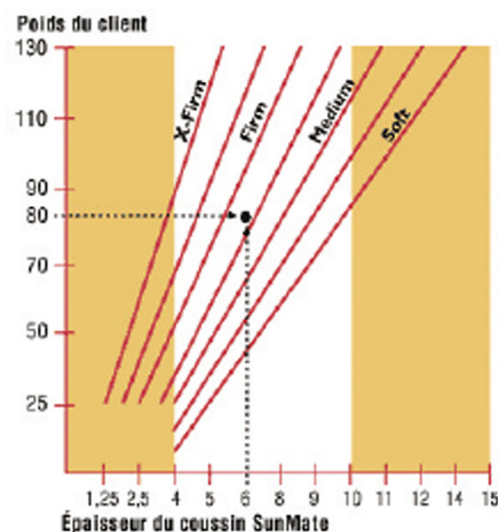

Application typique de votre ensemble FIPS

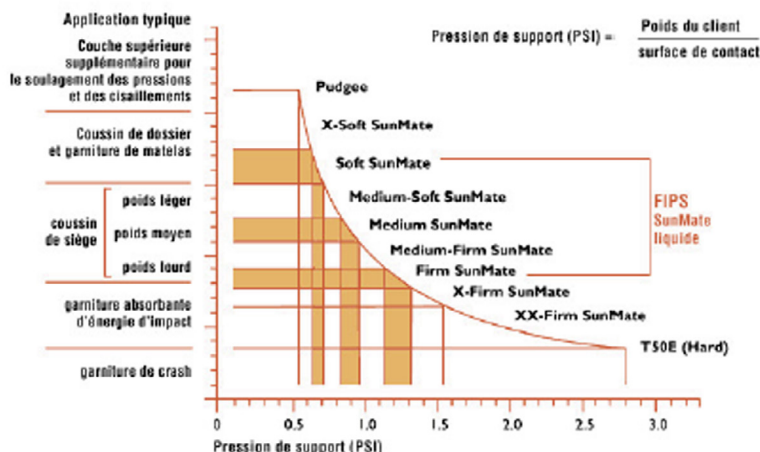

Commander votre ensemble FIPS

Une unité de **Liquid SunMate**® est fourni en trois parties contenant les ingrédients prétestés et prémesurés pour modeler un coussin de siège ou de dossier. La réalisation d'un ensemble complet assise/dossier demande généralement 2 unités de **Liquid SunMate**®.

- **Liquid SunMate**® est disponible en formulation soft (rose), médium (bleu) ou semi-rigide (vert).
- Précisez à la commande si vous souhaitez un **Bowl Pack** ou un **Bag Pack**.



Bowl Pack intro kit : Comprend: un manuel d'instruction FIPS, 1 unité de **Liquid SunMate**®, 1 kit de «quality test», 2 coussins SunMate (40 cm x 45 cm X 2,5 cm), 1 Feuille de SunMate (40 cm x 92 cm x 0,6 cm), 2 sacs plastiques de moulage, 2 paires de gants et une paire de lunette de protection.



Bag Pack intro kit : Comprend: un manuel d'instruction FIPS, 1 unité de **Liquid SunMate**®, 2 coussins SunMate (40 cm x 45 cm X 2,5 cm), 1 Feuille de SunMate (40 cm x 92 cm x 0,6 cm), 2 sacs plastiques de moulage, 2 paires de gants et une paire de lunette de protection.

Les compléments des Pack intro kit de Liquid SunMate® sont référencés en format de 1, 1/2, 1 + 1/2 unités et 1/3 en Bowl Pack seulement.

Pour commander, contactez notre service commercial au 02 41 69 38 01 (Europe) ou au 1-800-668-2252 (Canada) ou consultez le catalogue général ainsi que notre liste de prix.



Siège social Canada

370 10e Avenue Sud
Sherbrooke, Québec J1G 2R7
tél : (819) 823-2252
fax : (819) 565-3337
courriel: info@physipro.com

Succursale France

Village des Entrepreneurs
461 rue St Léonard – Bât. H4
49000 ANGERS, FRANCE
tél : +33 (0) 2 41 69 38 01
fax : +33 (0) 2 41 69 43 32
courriel: contact@physipro.fr