


Toile Velcro avec Appuis-Thoraciques

Manuel d'utilisation

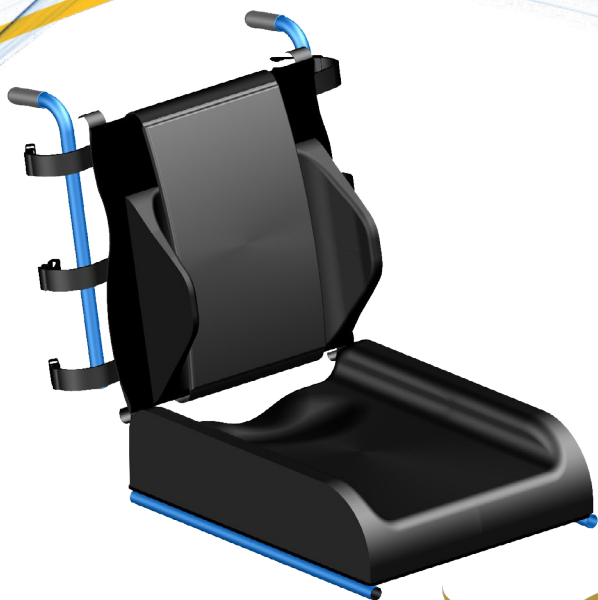

PHYSIPRO

Aides techniques à la posture et à la mobilité

Ce livret contient d'importantes informations relatives à ce produit.
Merci de le remettre à l'utilisateur final lors de la livraison.

Les Équipements adaptés Physipro inc.

L'entreprise Physipro inc. est fière de vous compter parmi ses clients et tient à vous remercier particulièrement pour la confiance que vous lui démontrez en vous procurant l'un de ses produits.

Le présent manuel d'utilisation a été conçu pour vous permettre d'utiliser les appuis-thoraciques, un produit Physipro inc., en toute sécurité et de façon optimale. Pour tous les ajustements et réglages nécessaires, Physipro inc. vous demande de vous adresser systématiquement à un professionnel reconnu.

Physipro inc. se dégage de toute responsabilité relative aux dommages corporels ou matériels résultant d'un mauvais usage, d'un manque de précaution dans l'utilisation de ses produits ou d'une modification apportée sans son consentement écrit.

Pour Physipro inc., votre satisfaction demeurera toujours une priorité.

Toile Velcro avec Appuis-Thoraciques

La toile velcro est un dossier souple permettant l'installation d'appuis thoraciques. Fabriquée en velcro velours, elle demeure réglable en largeur grâce à une pièce de lycra cousue en son centre. Elle se décline en trois tailles pour permettre une adaptation à toutes les largeurs de dossier.

La bande élastique permet un ajustement latéral de 2" (5 cm).


Si nécessaire, on pose des maintiens thoraciques droit et gauche.

Ces maintiens de forme anatomique « accompagnent » le tronc du patient de la crête de hanche à l'aisselle. Ceux ci se positionnent à l'endroit souhaité sur la toile avec une semelle velcro (côté crochets).

L'utilisation d'appuis thoraciques anti-effet hamac est recommandée lorsque la toile est placée sur un fauteuil roulant qui n'a pas de biseau anti-effet hamac (dossier toile).

PRINCIPE D'INSTALLATION DU JEU COMPLET

Principe de fixation du dossier toile velcro + appui-thoraciques

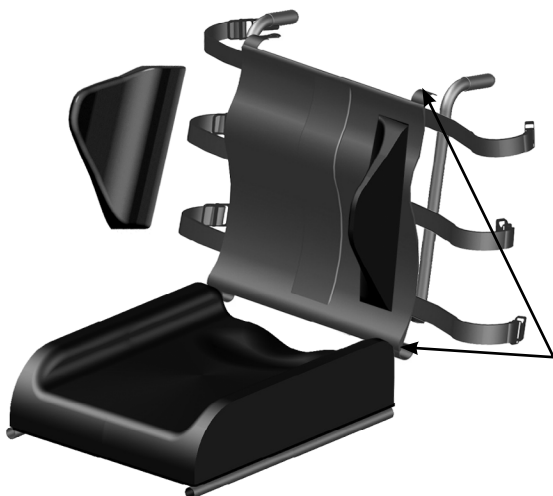

Quatre petites courroies stabilisent la toile en hauteur en les faisant contourner le haut et le bas des tubes de dossier.

GARANTIE

Ce produit est couvert par une garantie sur pièces et main d'œuvre pour une période de douze (12) mois contre tout défaut de fabrication sur les composantes optionnelles et les pièces neuves remplacées par le fournisseur ou par un établissement autorisé, et ce, à compter de la date de livraison ou, le cas échéant, de la date de remplacement. Les Équipements adaptés Physipro inc. s'engage à réparer ou remplacer les pièces défectueuses durant toute la période de garantie. Pour bénéficier du service de garantie, contactez Les Équipements adaptés Physipro inc. ou un établissement autorisé. Ne retournez pas ce produit sans consentement préalable. Dans le cas où le service serait considéré insatisfaisant, vous pouvez faire parvenir vos commentaires à l'adresse inscrite dans ce document, accompagné du nom et de l'adresse du fournisseur et de la date de livraison.

Exclusions et limitations

La présente garantie ne s'applique pas aux produits altérés accidentellement ou intentionnellement, aux produits qui ont fait l'objet d'une utilisation non appropriée, de négligence, d'un mauvais entretien ou d'un mauvais entreposage. De plus, cette garantie ne s'applique pas aux produits endommagés à la suite d'une réparation ou d'une modification réalisée sans le consentement écrit de Les Équipements adaptés Physipro inc. ou d'un établissement autorisé. Les mêmes restrictions s'appliquent lors d'un endommagement découlant de toute autre circonstance indépendante de la volonté de Les Équipements adaptés Physipro inc. Enfin, cette garantie ne s'applique pas à l'usure normale des pièces ou au non-respect des indications mentionnées dans le présent document.

Les Équipements adaptés Physipro inc. se dégage de toute responsabilité liée aux dommages pouvant être subis au cours du transport.



Canada

370, 10e Avenue Sud
Sherbrooke (Québec) J1G 2R7
Canada

1 800 668-2252
info@physipro.com

Europe

Village des entrepreneurs
461, rue Saint-Léonard
49000 Angers
France

02 41 69 38 01
contact@physipro.fr