






## DOSSIER TENSION RÉGLABLE MODULAIRE


Confortable grâce à la mousse de dispersion et aux courroies dorsales qui le composent. Le dossier tension réglable modulaire favorise le redressement et l'équilibre du tronc. Il agit de façon préventive en diminuant le risque de déformation.

1


### Nombre de pièces incluses

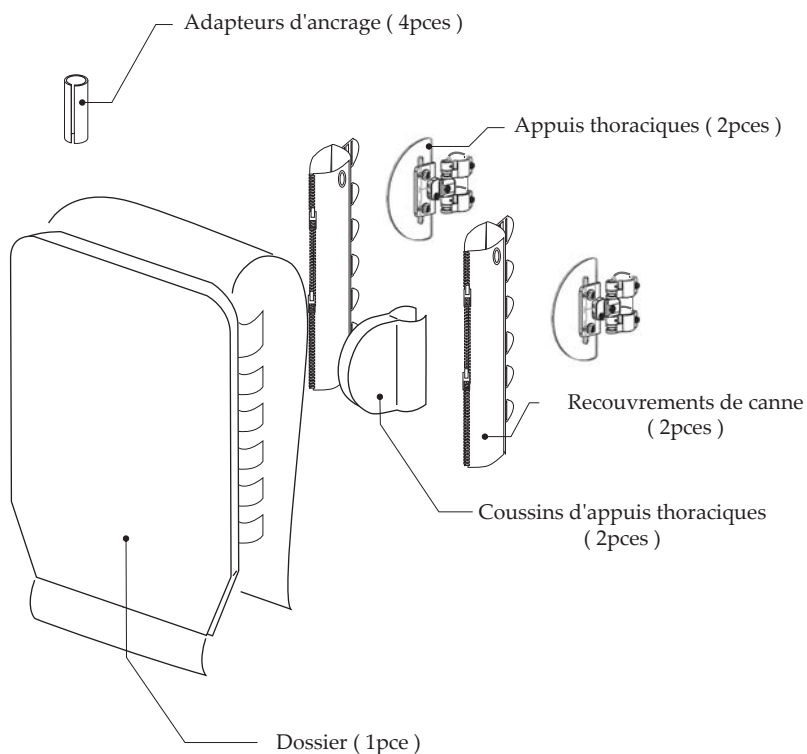

2


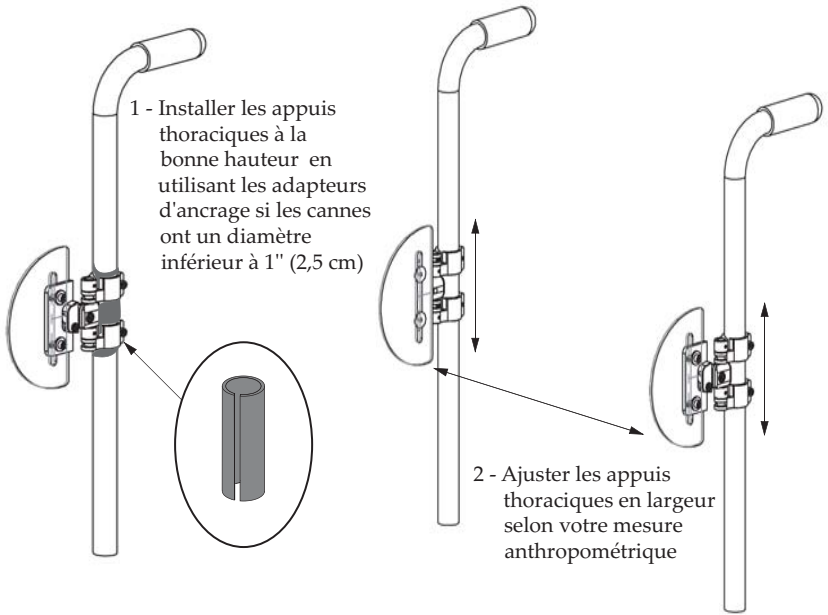


3

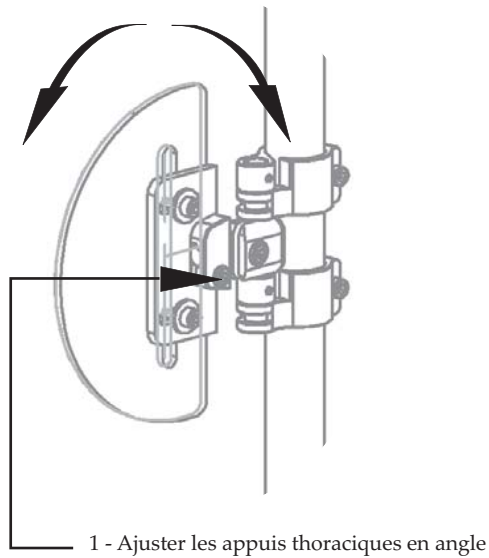


4

1 - Installer les recouvrements de canne

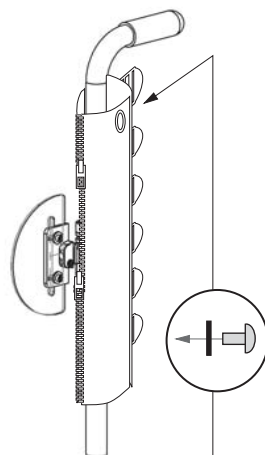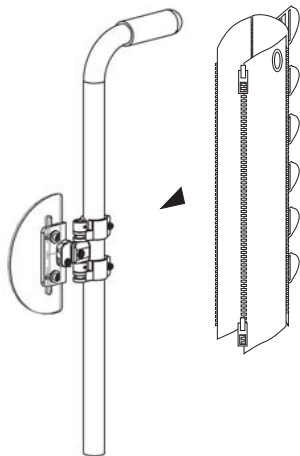

2 - Fixer les recouvrements de canne aux montants de dossier en vissant une vis auto-perçante dans l'oeillet du haut





3 - Installer les coussins sur les appuis thoraciques

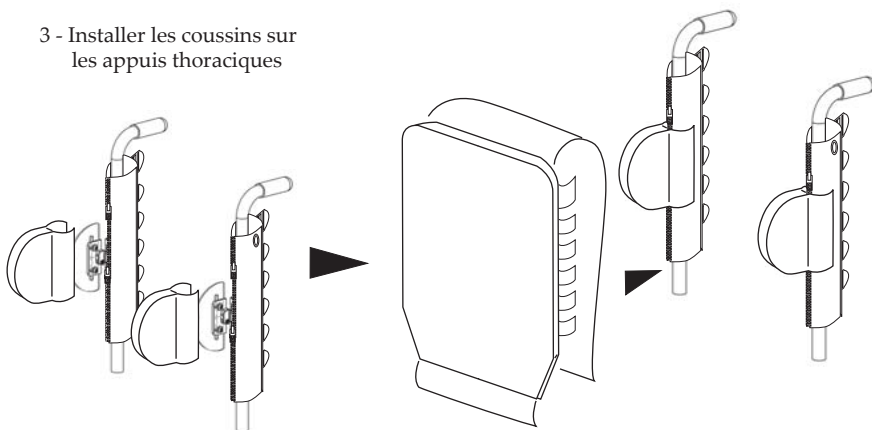

4 - Installer le coussin de dossier entre les appuis thoraciques

5


1 - Passer chaque courroie dans les boucles des recouvrements de canne et ajuster la tension

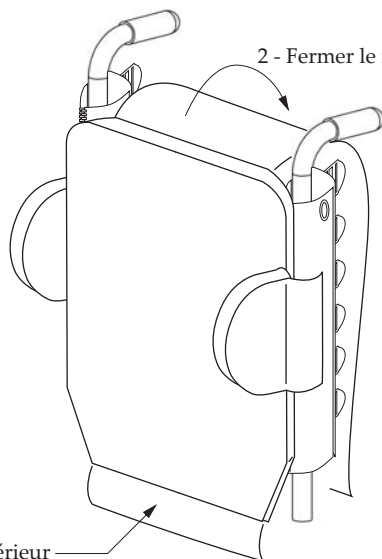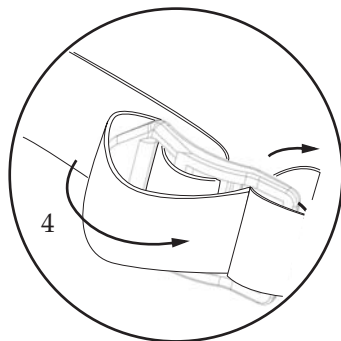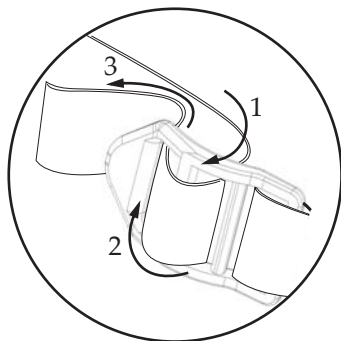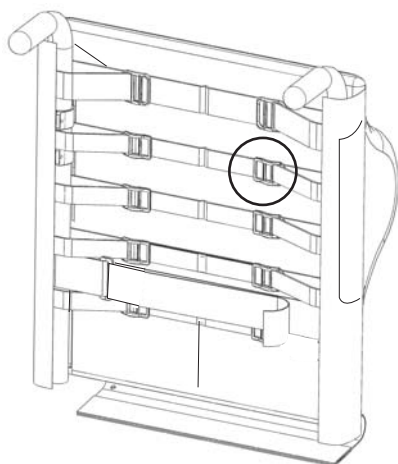

2 - Fermer le rabat supérieur


3 - Fixer le rabat inférieur  
sous le siège

6

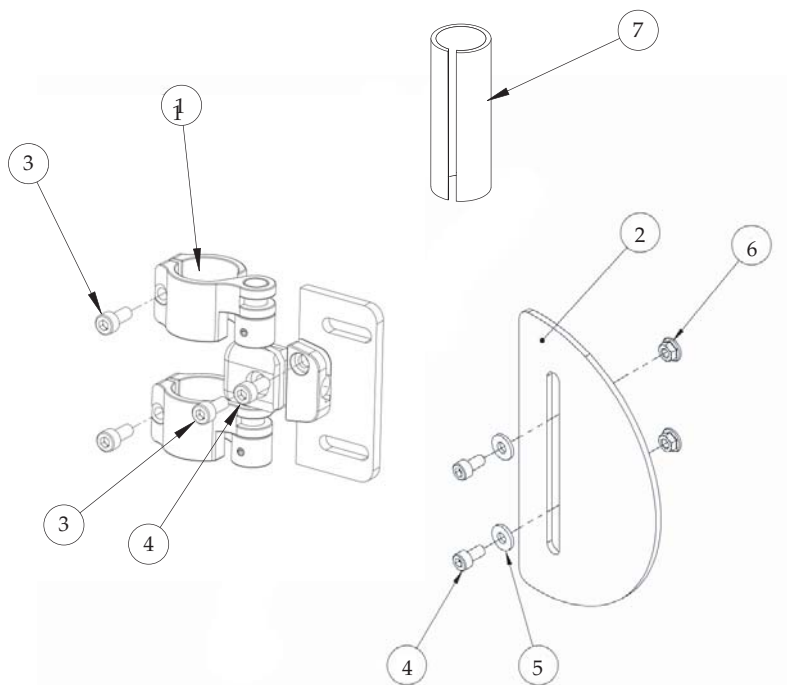

no.	DESCRIPTION	NO. Produit
1	<b>Ancrage d'appui thoracique ( tube 1 po ( 2.5 cm ) )</b>	<b>D3845</b>
	<b>Ancrage d'appui thoracique ( tube 1 1/8po ( 2.9cm ) )</b>	<b>D3840</b>
2	<b>Plaque d'appui thoracique ( mini )</b>	<b>D3823</b>
	<b>Plaque d'appui thoracique ( court )</b>	<b>D3825</b>
	<b>Plaque d'appui thoracique ( moyen )</b>	<b>D3030</b>
	<b>Plaque d'appui thoracique ( long )</b>	<b>D3835</b>
3	<b>M-5 16</b>	<b>ST-51387</b>
4	<b>M-5 10</b>	<b>ST-51384</b>
5	<b>Rondelle M-5</b>	<b>ST-51173</b>
6	<b>Flange nut M-5</b>	<b>ST-50332</b>
7	<b>Adaptateur d'ancrage ( tube 3/4 po ( 1.75 cm ) )</b>	<b>D3862</b>
	<b>Adaptateur d'ancrage ( tube 7/8 po ( 2.25 cm ) )</b>	<b>D3861</b>

7

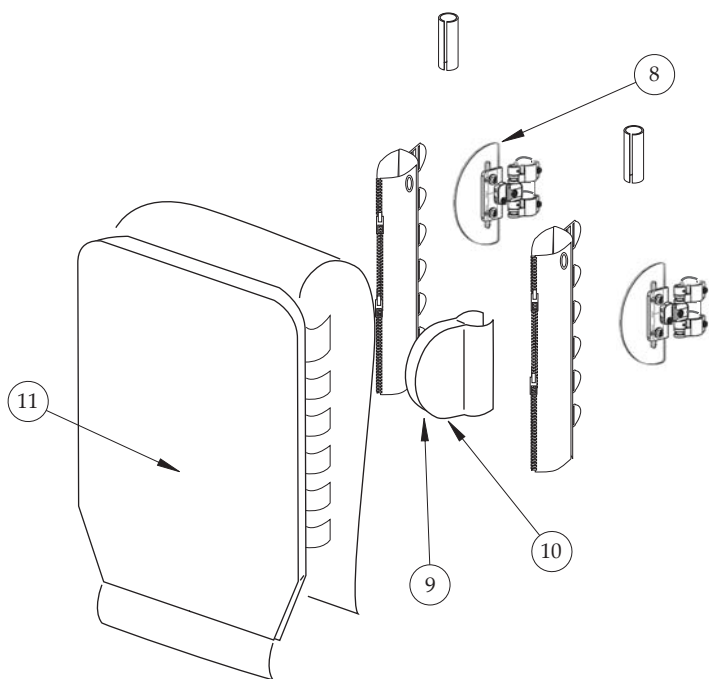

no.	DESCRIPTION	NO. Produit
8	Ensemble - appui thoracique - mini	D3921
	Ensemble - appui thoracique - court	D3822
	Ensemble - appui thoracique - moyen	D3823
	Ensemble - appui thoracique - long	D3824
9	Coussin appui-thoracique - mini	D3884
	Coussin appui-thoracique - court	D3885
	Coussin appui-thoracique - moyen	D3886
	Coussin appui-thoracique - long	D3887
10	Housse appui thoracique mini	D3870
	Housse appui thoracique court	D3871
	Housse appui thoracique moyen	D3872
	Housse appui thoracique grand	D3873
11	DTRM avec appui thoracique	D3811
	DTRM sans appui thoracique	D3812



## Canada

LES ÉQUIPEMENTS  
ADAPTÉS PHYSIPRO INC.

370, 10e Avenue Sud  
Sherbrooke (Québec)  
J1G 2R7 Canada

T. 1 800 668-2252  
F. 819 565-3337  
info@physipro.com  
order@physipro.com



## Europe

Importateur :  
SASU PHYSIPRO IMPORT

Village des entrepreneurs  
461, rue Saint-Léonard  
49000 Angers - France

T. 02 41 69 38 01  
F. 02.41.69.43.32  
contact@physipro.fr