

CHAQUE PERSONNE A LE DROIT D'ÊTRE CONFORTABLE

Parmi tous les dossiers de Physipro, le **Premium** est l'un des plus appréciés.

Confortable, léger, durable et facile à utiliser, le Premium permet d'obtenir un contrôle bilatéral complet du dos. Les courroies du dossier Premium permettent de modifier avec facilité le support dorsal afin d'assurer un confort inégalé aux personnes aux prises avec des gibbosités, cyphoses, lordoses et rotations du tronc.



Afin de bénéficier de tous ses avantages, il est important d'en connaître la procédure d'installation adéquate.



Installation des recouvrements de cannes



1) REPÉREZ LA BANDE VELCRO

Pour départager quel recouvrement de canne se positionne à gauche ou à droite, il suffit de repérer la bande de Velcro. Celle-ci doit être orientée vers le devant de la chaise afin d'y installer le dossier. Vous devez aussi vous assurer que la courroie est bien positionnée en haut du recouvrement de canne.



2) VISSEZ LE RECOUVREMENT DE CANNE

Vissez le recouvrement de canne sur la chaise en prenant soin d'ajouter une rondelle métallique.



3) REFERMEZ

Refermez les fermetures à glissières sur votre canne ou sur l'ancrage de vos appuis-thoraciques. Il est possible d'ajuster à tout moment les ancrages par la fenêtre refermable offerte à l'arrière des recouvrements de cannes.



4) RETIREZ LA BANDE CENTRALE

Si votre dossier est neuf, la bande centrale se trouve dans le sac de livraison. Si votre dossier a déjà été utilisé, vous pourriez avoir besoin de retirer la bande centrale du dossier en mousse afin de rectifier ou améliorer l'ajustement.



5) INSTALLEZ LES COURROIES AJUSTABLES

Le secret de la solidité et de la durabilité du dossier Premium se trouve dans cette étape cruciale : l'installation des courroies ajustables.

Il est important que les courroies encerclent les recouvrements de cannes, tel que démontré à gauche, et passent par l'œillet métallique sur la canne droite et sur celle de gauche.



- Si vous n'avez pas besoin des recouvrements de cannes, le même principe s'applique avec les courroies indépendantes qu'il faut visser dans la canne, entourer et ajuster.



6) CRÉEZ LA TENSION


Créez la première tension du dossier en installant les courroies dans les boucles de la bande centrale, comme si vous ajustiez les courroies d'un sac à dos: les plus grosses boucles avec les plus grosses courroies.

- Prenez note du mécanisme qui permet d'insérer facilement les courroies dans la boucle, mais qui les empêche aussi de se désajuster. Un mouvement de bascule du pouce est nécessaire pour insérer la courroie dans la boucle.



7) AJUSTEZ TOUTES LES COURROIES


Il suffit de suivre le même processus pour toutes les courroies du dossier. Encerclez les recouvrements de cannes de la courroie, passez la courroie dans l'œillet métallique pour la stabiliser, puis créer la tension désirée en ajustant la courroie avec la boucle sur la bande centrale.

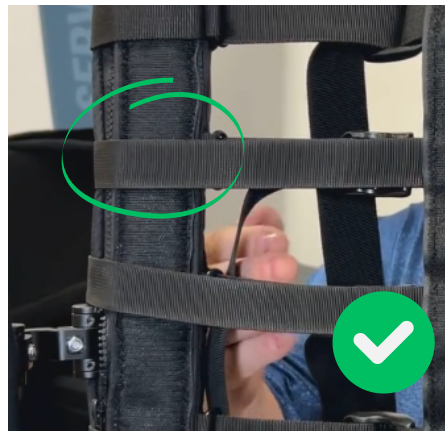

8) TERMINEZ L'INSTALLATION DES COURROIES AJUSTABLES

Voici un exemple d'ajustement adéquat en haut et erroné, en bas.

En haut, le dossier est souple et résistant, car la pression exercée par le poids de la personne sera absorbée par les cannes du fauteuil.

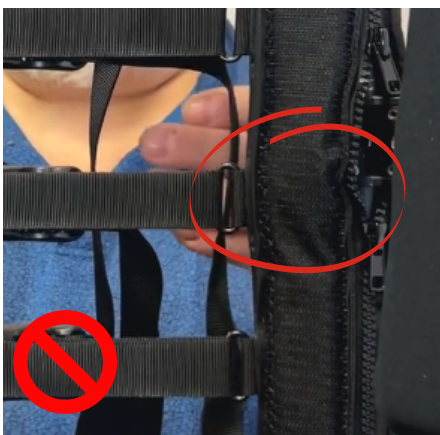

En bas, cette même pression est concentrée sur les œillets et sur les fermetures à glissières. Deux éléments non conçus pour une telle charge de pression.

Il est donc primordial d'installer les courroies autour des recouvrements de cannes pour en optimiser le confort, la sécurité et la durabilité du dossier Premium.



9) REMETTEZ LE DOSSIER SUR LA BANDE CENTRALE

Une fois vos courroies ajustables installées adéquatement, il suffit de remettre le dossier sur la bande centrale avec les velcros.



10) INSERTION DES COURROIES DANS LE DOSSIER

Dernier détail afin d'assurer la stabilité du dossier Premium sur votre fauteuil, l'insertion des courroies du haut dans les fentes prévues à cet effet au dos de la housse du dossier. Vous devrez désajuster temporairement la courroie du haut pour l'insérer dans les fentes.



11) FINITION

Installer des attaches autobloquantes (Tie Wrap) dans les œillets au bas du dossier pour s'assurer du maintien constant de la tension, puis couvrez les courroies du rabat esthétique avec le velcro.



Contactez votre représentante Physipro pour demander une démo ou pour commander un dossier Premium.

Marie-Soleil Riverin

Bas St-Laurent, Saguenay, Capitale Nationale, Mauricie, Centre du Québec, Côte Nord, Nord du Québec, Chaudière Appalaches, Lanaudière, provinces Maritimes et Ontario (services de modelage 3D personnalisés seulement).

581-994-6721

mariesoleilr@physipro.com

Marie-Pier Languedoc

Estrie, Montréal, Laval, Montérégie, Laurentides, Outaouais et Abitibi

819-674-0115

mplanguedoc@physipro.com