

Coussins par Supracor

avec technologie nids d'abeilles Stimulite®

Manuel de l'utilisateur



Ce livret contient d'importantes informations relatives à ce produit. Merci de le remettre à l'utilisateur final lors de la livraison.



FÉLICITATIONS pour l'achat de votre coussin à technologie révolutionnaire à nids d'abeilles Stimulite!

Les coussins Stimulite offrent une gestion complète de la pression (Total Pressure Management®) - réduction de la pression, diminution de l'effet de cisaillement et aération pour contrôler la chaleur et l'humidité - la solution clé pour la prévention des escarres.

Ils sont faits d'un composé d'uréthane thermoplastique qui est naturellement antibactérien, antifongique et résistant aux odeurs. Et pour vous aider à garder votre peau propre et en santé, ils sont lavables à la main ou à la machine.

ATTENTION!

Avant de changer de système d'assise, il est conseillé de **consulter votre ergothérapeute ou professionnel de la santé afin de le tester et le faire installer correctement. Un coussin peut, en effet, affecter le centre de gravité de votre fauteuil et causer une perte de stabilité. Quelques ajustements mineurs seront donc requis sur votre aide technique à la locomotion.**



Système complet d'aération

CONSEILS

Afin d'éviter l'apparition d'escarres dues à des points de pression, nous vous **conseillons de changer de position sur le support en moyenne toutes les trois heures. Il est également nécessaire de vérifier régulièrement si des rougeurs apparaissent sur votre peau, notamment autour des protubérances osseuses. Les coussins à technologie en nids d'abeilles Stimulite sont spécialement conçus pour soulager la pression. Toutefois, ils ne sauraient être substitués à une bonne hygiène de la peau, un régime alimentaire adapté et un changement fréquent de position.**

Contactez immédiatement votre médecin ou thérapeute si les rougeurs persistent.

POIDS DE L'UTILISATEUR

Selon les mesures de coussin, le poids de l'utilisateur peut varier entre 75 et 250 livres - 34 à 90 kg. (Le coussin bariatrique supporte un poids jusqu'à 650 livres - 295 kg)

MISE EN GARDE DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser un système d'assise de manière prolongée, il est conseillé d'essayer le coussin pendant quelques heures et de vérifier que des rougeurs ne se développent pas.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE

Les coussins Stimulite peuvent être lavés à la main ou à la machine à l'eau froide au cycle délicat.

- Utiliser seulement une petite quantité de détergent doux (1 cuil. à soupe).
- **NE JAMAIS UTILISER DE JAVELLISANT.**
- Après le nettoyage, secouez pour faire sortir l'excédent d'eau.
- Faites sécher la feuille Stimulite à l'air libre ou dans la machine à sécher en utilisant le sèche-linge à la température minimale.
- **NE PAS** sécher la feuille Stimulite avec des vêtements mouillés, car cela engendrera une rétention de la chaleur et peut endommager la feuille Stimulite.

Chaque coussin Stimulite inclut un sèche-linge pour le lavage et le séchage à la machine.

***Utiliser uniquement une machine à laver à chargement frontal. Une machine traditionnelle risquerait d'endommager les nids d'abeilles.**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Un coussin doit être installé sur une surface propre et plane.
- Vérifier la compatibilité dimensionnelle du coussin et de l'assise ainsi que le réglage de la hauteur des appuis-bras lors de l'installation.
- Pour une meilleure efficacité du support, il est important de limiter au maximum les surépaisseurs entre le corps et le coussin, à l'exception du vêtement de corps et d'un éventuel change complet.
- Des vêtements en coton, peu serrés et si possible sans coutures sur les zones d'appuis sont préférables.
- Ne pas intercaler de serviette, drap plié ou toute autre surface entre l'utilisateur et le coussin.
- Veiller également à l'absence de tout corps étranger comme des tubulures, miettes, corps gras...
- Il est recommandé de consulter votre thérapeute dans le mois suivant l'installation de ce coussin pour s'assurer de son efficacité.

GARANTIE DES COUSSINS

Nous offrons une garantie de 2 ans sur les coussins Stimulite Classique/XS, Contour/XS, Slimline®/XS, Silver, Sport, Corbee® pédiatrique et Contour pédiatrique.

Cette garantie inclut tout dommage dû à la manutention, un défaut matériel ou une erreur causée par le manufacturier. Cette garantie n'inclut pas les dommages résultant de l'usage quotidien ou les déchirures causées par un mauvais entretien.

La housse de votre coussin est garantie 90 jours. Celle-ci couvre tout dommage dû à la manutention, un défaut matériel ou une erreur causée par le manufacturier. Sont exclus de la garantie: les cas de brûlures par cigarettes, les dommages par des objets pointus pouvant provoquer des déchirures ou les changements de couleurs causés par le non-respect des consignes de lavage.

ÉLIMINATION DES DISPOSITIFS MÉDICAUX

Ne pas brûler ou jeter dans la nature le coussin et sa housse de protection en dehors des lieux dédiés.

DURÉE DE VIE

La durée de vie estimée des coussins Stimulite est de 4 ans.

STOCKAGE

Les coussins Stimulite doivent être de préférence stockés sur une surface plane, à l'abri de la lumière directe et de l'humidité.

Distributeur exclusif au Canada et en France



PHYSIPRO

Canada



LES ÉQUIPEMENTS
ADAPTÉS PHYSIPRO INC.

370, 10e Avenue Sud
Sherbrooke (Québec)
J1G 2R7 Canada

T. 1 800 668-2252
F. 819 565-3337
info@physipro.com
order@physipro.com

Europe



Importateur :
SASU PHYSIPRO IMPORT

Village des entrepreneurs
461, rue Saint-Léonard
49000 Angers - France

T. 02 41 69 38 01
F. 02.41.69.43.32
contact@physipro.fr



Fabricant: Supracor Inc. 2050 Corporate Court San Jose, CA 95131-1753 États-Unis
www.supracor.com